




**MONITOR DE RESPIRACIÓN Y POSICIÓN DE BEBÉ
EN UN BOTÓN INTELIGENTE**

Funciona con teléfonos
iPhone® y Android®

Trabaja con
CUALQUIER

PIJAMA
O MAMELUCO
TÍPICO

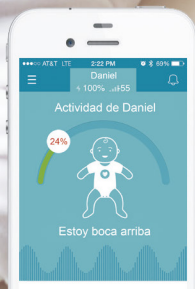

monbaby®

CONTENIDO

1.	¿QUE CONTIENE LA CAJA?	4
2.	GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA	4
3.	DESCARGANDO LA APLICACIÓN	5
4.	CONEXIÓN A LA APLICACIÓN	5
5.	USANDO LA APLICACIÓN	6
5.1	Calibración	6
5.2	Tablero principal	6
5.3	Ajustes	7
6.	ABROCHAR EL BOTÓN	7
7.	REMOVER EL BOTÓN	7
8.	REEMPLAZO DE LA BATERÍA	8
9.	SEGURIDAD Y OTRAS NOTAS IMPORTANTES	9
10.	GARANTÍA LIMITADA	12
11.	RENUNCIAS Y LEGAL	14
12.	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS	15

Si usted está teniendo problemas con la configuración del dispositivo, por favor contáctenos a support@mondevices.com

MONBABY NO SUSTITUYE A LOS PADRES

Tu producto MonBaby es una ayuda para cuidado de los niños, no es un dispositivo médico y no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad, incluyendo el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL).

MONBABY ES UN MONITOR DE RESPIRACIÓN Y POSICIÓN DE BEBÉ EN UN BOTÓN INTELIGENTE Y NO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO COMO UN JUGUETE.

FCC ID: 2ADM2-MONB2.
IC ID: 12529A-MONB2.
IFT #: RCPMOMO17-0279.

Marca: MonBaby.
Nombre comercial: MonBaby Smart Button.
Modelo: 1A.
Usa una batería CR2032 de 3 Vcc.
País de origen: USA (Estados Unidos).

¿QUE CONTIENE LA CAJA?

El paquete de MonBaby incluye:

1. Un (1) MonBaby Botón Inteligente (batería incluida)
2. Un (1) Anillo del botón inteligente MonBaby
3. Documentación justificativa incluyendo el Manual de Usuario
4. Destornillador y baterías. Mantenga el destornillador y cualquier baterías extra incluidos con su MonBaby fuera del alcance de los niños.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1. Desempaque el MonBaby botón inteligente e inserte la batería (Para obtener ayuda, por favor lea el reemplazo de la batería en el manual página 8).
2. Descargue la aplicación de MonBaby desde la AppStore® (dispositivos de Apple®) o Google Play® (Android®).
3. Conecte el MonBaby botón inteligente a la aplicación MonBaby (Para obtener ayuda, por favor lea la página 5 del manual para obtener instrucciones detalladas).
4. Calibre el MonBaby botón inteligente (Para obtener ayuda, por favor lea la página 6 del manual para obtener instrucciones detalladas).

Si tienes algún problema con el sistema o la operación de tu MonBaby NO DEVUELVAS EL DISPOSITIVO, envía un correo electrónico a nuestro equipo de soporte a support@mondevices.com

Para encontrar la última versión del manual de MonBaby, por favor consulta la página de apoyo o nuestras preguntas frecuentes en www.monbaby.com/es/faq-2/

Usted puede encontrar nuestro manual de vídeo situado en nuestra página web: <https://monbaby.com/video-manual>

DESCARGANDO LA APLICACIÓN

Para descargar la aplicación Monbaby, visita MonBabyApp.com usando el navegador de tu teléfono móvil y serás dirigido a la lista de app iPhone App Store® o Google Play™



También puedes escanear el código QR de la derecha:



CONEXIÓN A LA APLICACIÓN

Para realizar el proceso de instalación lo más rápido posible, activa Bluetooth® en tu dispositivo antes de abrir la aplicación MonBaby, a continuación accede a la opción Bluetooth® dentro del menú 'Configuración' de tu teléfono.

Cuando se abre por primera vez la aplicación MonBaby, te lleva a la pantalla de configuración de conexión, donde te permite conectar el botón MonBaby con la aplicación.

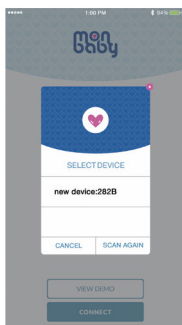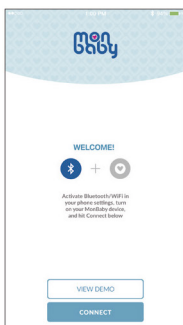

Si Bluetooth® está activada en el dispositivo, el icono de Bluetooth® de la izquierda debe aparecer de color azul y se puede proceder al siguiente paso. Si el icono de Bluetooth® está gris, puedes tocarlo para activar el Bluetooth® en el teléfono.


Una vez que el logotipo de Bluetooth® es azul, está listo para conectarse. Toca el botón '**Conectar**' en la parte inferior de la pantalla, y veras un pop-up que indicará que se ha detectado el dispositivo MonBaby y ahora está disponible. Un nuevo MonBaby aparecerá como nuevo dispositivo. Toca el nombre del dispositivo para completar el proceso de conexión. La primera vez que conectes el dispositivo, se te pedirá que introduzcas el nombre del bebé para una experiencia personalizada.

Una vez conectado, serás llevado al tablero principal. Si no puedes conectar el MonBaby botón inteligente a la aplicación, consulta nuestra sección de solución de problemas o ponte en contacto con el servicio de asistencia al cliente a support@mondevices.com. El dispositivo debe ser compatible con la tecnología Bluetooth®, tecnología inteligente que está disponible a partir de iOS® 7 y Android™ 4.4.

USANDO LA APLICACIÓN

Una vez que tengas tu botón MonBaby abrochado y conectado a la aplicación, puedes utilizar la aplicación para monitorear los hábitos del bebé durante su sueño. Puedes ver los detalles de la aplicación a continuación.

Calibración

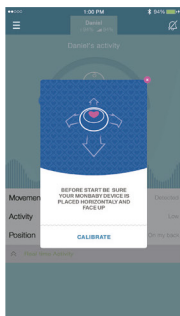

La pantalla de calibrar deberá aparecer después de abrochar el MonBaby botón inteligente en la pijama del niño y cuando estés conectado a la aplicación de MonBaby.


Siempre puedes volver a calibrar seleccionando calibrar desde el menú.

Espera hasta que la calibración se haya completado. Si cierras la ventana de calibración, saldrás del tablero principal, y cerrarás la sesión del dispositivo.

Muy importante

Para mejores resultados, coloca el botón MonBaby entre el pecho y abdomen del niño. El bebé debe estar acostado boca arriba sobre una superficie firme.

Tablero principal

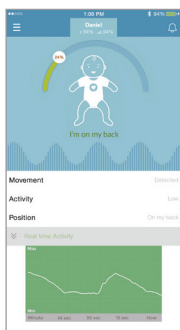

Barra de actividad

Esta barra te muestra el nivel de actividad de tu bebé

Estado visual

Esta imagen muestra si tu bebé duerme en su estómago o espalda, y el estado indica el estado común del bebé

Movimiento

‘Descubierto’ o ‘Inactivo’. Inactivo indica si no hay movimiento de respiración detectado dentro de 15 segundos

Apazamiento


Esto te indica si tu bebé está en su espalda o estómago

Estado de actividad

Indica si el bebé se despierta o está inquieto y muestra si la actividad es baja, media o alta

Actividad de tiempo real

El cuadro de Actividad de Tiempo real te muestra la actividad de movimiento de tu bebé en el último minuto transcurrido

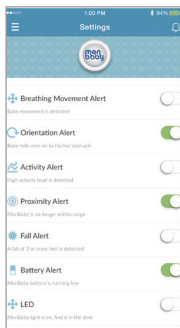

Indicador del nivel de la señal

Indica el porcentaje de señal que tienes entre tu teléfono y el Botón MonBaby

Indicador de la duración de la pila

El porcentaje de batería restante en el botón MonBaby y tiempo de uso restante estimado

MonBaby Nombre

Ver y editar el nombre asociado con el dispositivo MonBaby botón inteligente

Alerta de movimientos respiratorios

Te avisa si se sospecha que hay un detenimiento en la respiración y el movimiento (absolutamente ningún movimiento)

Alerta de orientación

Te avisa si tu bebé se mueve sobre su estómago

Alerta de actividad

Te avisa si tu bebé se despierta

Alerta de proximidad

Te avisa si el MonBaby botón inteligente (y tu hijo) están fuera del rango de tu teléfono

Alerta de detección de caída

Te avisa si tu bebé ha caído

Ajustes adicionales

La aplicación de MonBaby puede contener ajustes adicionales de vez en cuando

ABROCHAR EL BOTÓN INTELIGENTE

1. Coloca el anillo del botón MonBaby en el interior de la pijama o mameluco de tu bebé, con el lado convexo hacia tu bebé.
2. Alinea el botón MonBaby en el exterior de la pijama de tu bebé con el anillo del botón MonBaby y presiona dentro del anillo de manera que se abroche a la pijama o mameluco.

Importante

Para un mejor rendimiento, sujeta el MonBaby en el centro del bebé, es decir, entre su pecho y su abdomen.

REMOVER EL BOTÓN INTELIGENTE

Para quitar el botón MonBaby, coloca tu mano debajo de la pijama de tu bebé y, usando tu dedo índice, empuja el botón hacia afuera a través del agujero en el centro del anillo. Asegúrate de que tengas la otra mano en el botón MonBaby para recogerlo después de empujarlo hacia afuera, y remover el anillo también. El botón MonBaby puede ser guardado dentro del anillo para permanecer en modo de espera automáticamente cuando no está en uso.



REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Ocasionalmente, necesitarás reemplazar la batería del botón MonBaby. Siempre puedes comprobar el nivel de la batería abriendo la aplicación de MonBaby donde es posible ver el porcentaje en la parte superior central de la pantalla. Para reemplazar la batería CR2032 de el botón MonBaby, sigue los pasos a continuación:



1. Retira el botón MonBaby del anillo
2. Gira el botón inteligente MonBaby de modo que la parte inferior (el lado sin luz LED) quede hacia arriba
3. Utiliza un pequeño destornillador Phillips para quitar un pequeño tornillo Phillips sosteniendo la puerta de la batería
4. Coloca tu dedo pulgar en el corazón grabado, presiona y desliza tu dedo pulgar hacia abajo para retirar la tapa de la batería
5. Utiliza tu dedo para sacar la batería existente
6. Inserta la batería nueva con el lado positivo (+) hacia arriba y el negativo (-) tocando la placa de circuito verde
7. Desliza la tapa de la batería hacia el botón MonBaby hasta que haga clic en su lugar
8. Usa un destornillador Phillips para asegurar la tapa con un tornillo Phillips y asegúrate de que el tornillo del compartimiento de la batería este completamente apretado
9. Desecha de forma segura la vieja batería del botón en conformidad con todas las regulaciones del gobierno. No deseches la batería en fuego. Mantén la batería lejos de tu bebé y otros niños que puedan ingerirla accidentalmente, ya que esto puede causar lesiones graves



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

© 2017 MonDevices Inc. Todos los derechos reservados. La MonBaby marca denominativa y el logotipo son marcas registradas de MonDevices Inc. Apple, el logotipo de Apple, y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android es una marca comercial de Google Inc. El Android robot es reproducido o modificado del trabajo creado y compartido por Google y utilizado de acuerdo con los términos descritos en la licencia Creative Commons 3.0 Attribution. La marca de la palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por MonDevices, Inc. se realiza bajo licencia. IOS es una marca registrada de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. y otros países.

SEGURIDAD Y OTRAS NOTAS IMPORTANTES

MONBABY NO SUSTITUYE A LOS PADRES

Tu botón MonBaby es un producto de ayuda con el cuidado de tu bebé, no es un dispositivo médico y no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad, incluyendo el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL).

Tu producto MonBaby no es un sustituto para una responsable supervisión directa por parte de los padres y los adultos que lo cuidan. Revisa a tu bebé a intervalos regulares. Crea un ambiente de sueño seguro para tu bebé, recibe entrenamiento en resucitación infantil y llama inmediatamente a la asistencia de emergencia en tu localidad si tu bebé ha dejado de respirar.

Los padres y cuidadores deben consultar a su profesional médico calificado en materia de seguridad de sueño o SMSL y la reducción del riesgo y verificar las recomendaciones pertinentes emitidas por el gobierno en su localidad con respecto a este tema de manera continua. Las indicaciones comunes sobre sueño infantil y la reducción de SMSL, como los emitidos por la Academia Americana de Pediatría en www.aap.org, incluyen, pero no se limitan a la lista de abajo. Asegúrate de consultar con tu profesional médico calificado antes de seguir cualquiera de las indicaciones mencionadas a continuación:

- Coloca al bebé boca arriba para cada período de sueño.
- Siempre utiliza una superficie firme para poner el bebé a dormir.
- Tu bebé debe dormir en la misma habitación que tú, pero no en la misma cama (compartiendo habitación sin compartir cama).
- Mantén las almohadas, mantas, juguetes de peluche y otros objetos suaves o ropa de cama suelta fuera de la cuna de tu bebé.
- Elige una cuna segura sin carriles con baranda que se muevan y nunca uses una cuna que ya no funcione o que tenga piezas faltantes o rotas.
- Ofrécele un chupón a la hora de la siesta o de irse a dormir.
- Evita cubrir la cabeza del bebé o sobrecalentarlo.
- Amamanta tanto y durante tanto tiempo como puedas.
- Mantén al bebé lejos de los fumadores y de los lugares donde la gente fuma.
- **Consulta con tu pediatra, ya que él o ella puede recomendar variaciones de estas indicaciones basadas en las circunstancias individuales de tu bebé.**

SIGUE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

El incumplimiento de estas instrucciones dará lugar a operaciones erróneas y puede afectar la conectividad o la exactitud de la información.

RECOMENDAMOS QUE EL BOTÓN MONBABY SEA COLOCADO ENTRE EL CENTRO DEL PECHO Y ABDOMEN DEL BEBÉ

Aunque el Botón MonBaby puede colocarse en cualquier lugar y guarda su posición, se recomienda colocar el MonBaby cerca del centro del bebé, entre su pecho y su abdomen.

MONBABY FUNCIONA ÓPTIMAMENTE CUANDO SE COLOCA EN LA MISMA HABITACIÓN CON EL TELÉFONO

Para un rendimiento óptimo, asegúrate de tener el botón inteligente MonBaby y tu teléfono/dispositivo en la misma habitación y en la línea de visión de la cuna. Aunque el MonBaby puede funcionar bien en distancias más largas, los factores ambientales tales como densas paredes hechas de ladrillo o metal u otros dispositivos en el hogar que puedan estar interfiriendo con el botón y puede limitar el rango del botón.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS, DESACTIVA WIFI Y/O 4G

Cuando Bluetooth está activado, a veces comparte los mismos recursos como Wi-Fi y 4G, lo que dificultará su rendimiento.

MONBABY NO SE PUEDE CONECTAR A MÁS DE UN TELÉFONO A LA VEZ

Actualmente, los teléfonos sólo pueden controlar un botón MonBaby; 'Modo Gemelo' está todavía bajo desarrollo para el botón inteligente

MEJORA LA VIDA DE LA BATERÍA

Para una mayor duración de la batería, sal de la aplicación y desactiva Bluetooth cuando el botón MonBaby no está en uso.

DEJA EL DISPOSITIVO CONECTADO PARA MONITOREAR DURANTE LA NOCHE

Asegúrate de que el teléfono o dispositivo en el cual se ejecuta la aplicación está conectado y cargándose durante la vigilancia nocturna al utilizar el MonBaby.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PUEDEN CAMBIAR EN EL FUTURO

Estamos trabajando constantemente para mejorar ciertas características de la aplicación móvil; puede que algunas características en el futuro ya no estén disponibles, cambien o desaparezcan.

LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

En caso de que tu MonBaby se ensucie, puede limpiarse cuidadosamente con un paño o toalla de papel. No olvides retirar el MonBaby antes de poner la ropa sucia en la lavadora.

AVISO

ESTE DISPOSITIVO CONTIENE MATERIAL ELÉCTRICO QUE PODRÍA CAUSAR HERIDA DE SER MANEJADO INADECUADAMENTE. MANEJO INPROPIO TAMBIÉN PODRÍA AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE DISPOSITIVO

- NO** Desarmes tu MonBaby con la excepción de cambiar la batería del dispositivo según las instrucciones proporcionadas.
- NO** Dejes la puerta del compartimento de las pilas desatornillada después de cambiar la batería del dispositivo y asegúrate de que el tornillo del compartimento de la batería esté completamente apretado.
- NO** Utilices tu MonBaby si no puedes fijar el dispositivo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- NO** Uses tu producto MonBaby si el Botón o el anillo están deformados, agrietados o dañados.
- NO** Coloques tu botón MonBaby en un lavavajillas, lavadora o secadora. No sumerjas tu Botón en el agua ni lo laves bajo un grifo. Limpia con cuidado con una tela limpia, húmeda.
- NO** Expongas tu producto MonBaby a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- NO** Expongas tu producto MonBaby al sol por un largo período de tiempo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

No hay modificaciones autorizadas: no realizar cambios o modificaciones a este producto sin la previa autorización expresa por escrito de MonDevices, Inc. Los cambios o modificaciones realizados sin la expresa autorización por escrito podrían anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: reoriente o cambie de lugar la antena receptora; aumente la separación entre el equipo y el receptor; conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor; consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.

GARANTIA LIMITADA

MonDevices, Inc ("MonDevices") garantiza al comprador original sólo que el dispositivo de MonBaby comprado (el "producto") será libre de defectos en materiales y habilidad bajo el uso normal para el periodo de un (1) año de la fecha de la compra detallista por el comprador original ("Período de garantía").

1 Recursos:

Si surge un defecto de hardware y MonDevices recibe una reclamación válida dentro del período de garantía, MonDevices, en su opción y en la medida permitida por la ley, ya sea (1) reparar el producto sin cargo alguno, usando piezas de repuesto nuevas o reacondicionadas, o (2) cambiar el producto con un producto nuevo o reacondicionado. Si MonDevices, a su sola discreción, determina que no es razonable reemplazar el producto defectuoso, MonDevices puede reembolsar la compra precio pagado por el producto. En caso de defecto, en la medida permitida por la ley, estas son sus recursos únicos y exclusivos. Gastos de manipulación y envío pueden aplicar excepto donde esté prohibido por la ley aplicable. Esta garantía limitada es válida solamente en las jurisdicciones donde los productos se venden por MonDevices sí mismo o a través de su distribuidor autorizado o agente y es válida en la medida permitida por las leyes de tales jurisdicciones. Cualquier producto de hardware de reemplazo estará garantizado durante el resto del período de garantía original o treinta 30 días, el que sea mayor, o por cualquier período adicional de tiempo que puede ser aplicable en su jurisdicción.

2. Cómo obtener servicio de garantía:

Para obtener servicio de garantía, usted debe obtener una autorización de devolución mercancía (RMA) de nuestro equipo de servicio al cliente y entregar el producto en su embalaje original o proporcionar el mismo grado de protección, junto con el comprobante de compra, a la dirección especificada por MonDevices. Usted conviene en pagar el costo de envío del producto a MonDevices. Por enviar el producto, usted está de acuerdo transferir la propiedad a MonDevices. Si la reclamación es justificada basada en esta garantía limitada, MonDevices correrá con los gastos de envío los reparados o producto de reemplazo a usted. Cualquier producto devuelto a MonDevices sin un reclamo de garantía válido o sin una RMA puede ser rechazado, volvió a costo del remitente (sujeta a pago anticipado) o durante 30 días para la recogida del remitente y los entonces eliminar a discreción de MonDevices. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo obtener servicio de garantía para su producto, visite el MonBaby sitio web <https://monbaby.com/support>.

Es tu responsabilidad de copia de seguridad de cualquier información, software u otros materiales almacenados o conservados en el producto.

Es probable que dichos datos, software u otros materiales serán perdido o re-formateados durante el servicio, y MonDevices no será responsable por cualquier daño o pérdida.

3. Exclusiones y Limitaciones:

Esta garantía limitada se aplica sólo a los productos fabricados por o para MonDevices que se pueden identificar por la marca «MonBaby», nombre comercial o logotipo correspondiente. La garantía limitada no se aplica a cualquier (a) MonDevices productos y servicios que no sea el producto, (b) consumibles (como baterías) o (c) software, incluso si va empaquetado o vendidos con el producto o incrustado en el producto. Por favor, consulte los términos de servicio que acompañan a la aplicación móvil de MonDevices para los detalles de sus derechos con respecto a su uso.

EL PRODUCTO NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO; NO ES REGULADO O APROBADO POR ALGUNA AGENCIA ESTATAL EN SU JURISDICCIÓN COMO UN DISPOSITIVO MÉDICO; Y NO ESTÁ DISEÑADO PARA DETECTAR O PREVENIR CAUSAS DE SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN MÉDICA.

El producto está diseñado para ser utilizado con aplicaciones móviles de MONDEVICES para ayudarle a controlar sus datos y no es un sustituto de atención médica o la supervisión de un adulto. MonDevices no garantiza que las operaciones del producto sean ininterrumpidas o libres de error. MonDevices no es responsable por daños y perjuicios derivados de incumplimiento de

las instrucciones relativas al uso del producto.

Esta garantía no se aplica a un producto o parte de un producto que ha sido alterado o modificado (por ejemplo, para alterar la funcionalidad o capacidad) por alguien que no sea un representante de MonDevices. Además, esta garantía limitada no cubre: (a) daños causados por el uso con productos no MonDevices; (b) daños causados por accidente, abuso, mal uso, derrames de comida o líquido u otras causas externas; (c) daño causado por el uso del producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por MonDevices o con un voltaje o fuente de alimentación; (d) uso de médico, con fines de asistencia sanitaria o tratamiento o (e) daños causados por servicio realizada por alguien que no sea un representante de MonDevices.

La recuperación y reinstalación de programas de software y datos de usuario no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía quedará anulada si un producto se devuelve con las etiquetas eliminadas, dañadas o alteradas o alguna otra alteración (incluso el retiro no autorizado de componentes internos o externos).

Ningún revendedor de MonDevices, agente o empleado está autorizado para hacer cualquier modificación o adición a esta garantía limitada. Si se considera que algún término es ilegal o inaplicable, la legalidad o aplicabilidad de los términos restantes no podrá ser afectada.

4. Las garantías implícitas y condiciones:

SALVO EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y CONDICIONES (INCLUIDAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR) ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA.

Algunas jurisdicciones no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o condición, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

5. Limitación de daños:

SALVO EN LA MEDIDA EN QUE ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, MONDEVICES NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES, O CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INGRESOS O DATOS, RESULTANTES DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O CONDICIÓN, O BAJO CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, INCLUSO SI MONDEVICES HA SIDO ACONSEJADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS Y CON INDEPENDENCIA DE LA FORMA DE ACCIÓN, YA SEA CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL O EQUITATIVA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, indirectos, incidentales o consiguientes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

6. Ley aplicable:

Esta garantía limitada debe ser gobernada por las leyes de la jurisdicción donde fue vendido el producto al usuario, sin generar conflicto de principios legales que puedan impedir la aplicación de las leyes de otra jurisdicción.

7. Derechos Estatutarios Nacionales:

Los consumidores en algunas jurisdicciones pueden tener derechos legales bajo la legislación nacional aplicable que regula la venta de bienes de consumo, incluyendo, sin limitación, las leyes de aplicación Directiva CE 1999/44. Estos derechos no se ven afectados por las garantías en esta garantía limitada.

Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con
MonDevices en support@mondevices.com.

RENUNCIAS Y LEGAL

Noticia de Ifetel: “La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

FCC (Norteamérica): Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. No hay modificaciones autorizadas: no realizar cambios o modificaciones a este producto sin la previa autorización expresa por escrito de MonDevices, Inc. Los cambios o modificaciones realizados sin la expresa autorización por escrito podrían anular la autoridad del usuario para operar este producto.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple Con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio o televisión para obtener ayuda.

Protección del medio ambiente: Este equipo electrónico contiene material reutilizable y no debe desecharse con la basura domestica. Llévelo a un punto de recogida de aparatos electrónicos (pregunte a sus autoridades locales para mayor detalle).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

Aquí está una lista de consejos para solucionar problemas comunes para ayudar a asegurarse de que su MonBaby está actuando en un nivel óptimo. Por favor contáctenos en support@mondevices.com si usted tiene alguna pregunta o requiere ayuda adicional.

PROBLEMA

Mi aplicación MonBaby no encuentra mi dispositivo MonBaby.

POSIBLES CAUSAS

1. Bluetooth® no está activado en el dispositivo inteligente.
2. Batería baja o descargada en el dispositivo MonBaby.
3. La batería no está haciendo una conexión correcta con el clip de batería MonBaby.
4. La aplicación MonBaby necesitará ser reiniciada.
5. Interferencia WiFi.
6. El dispositivo inteligente no tiene las especificaciones necesarias para uso de MonBaby.
7. MonBaby está demasiado lejos de su teléfono o tableta.
8. Configuración incorrecta Bluetooth®.

PASOS RECOMENDADOS

1. Asegure que su Bluetooth® está encendido, vaya al menú de ajustes de su dispositivo inteligente (por favor refiérase al manual del usuario de su dispositivo específico para instrucciones adicionales de cómo hacer esto).
2. Saque y coloque de nuevo la batería existente y verifique que la aplicación encuentre el dispositivo MonBaby. Si no es así, instale una batería nueva (CR2032) siguiendo las instrucciones de sustitución de la batería.
3. Por favor vea el video instructivo en nuestro canal de YouTube sobre cómo garantizar que la batería esté haciendo una conexión adecuada. Puede verlo en: <https://www.youtube.com/user/mondevices>
4. Forzar el cierre de la aplicación MonBaby haciendo doble clic el botón de inicio de su dispositivo Apple y deslizando el dedo hacia arriba o vaya al menú de configuración de su dispositivo Android™, elija Aplicaciones y, a continuación, elija la aplicación para la cual desea forzar el cierre.
5. Trate de apagar el WiFi en su dispositivo inteligente durante el proceso de instalación.
6. Asegúrese de que usted está usando un iOS® 7.0 o superior en un dispositivo Apple o Android™ 4.4 o superior en un dispositivo Android™.
7. Asegúrese de colocar el MonBaby junto al teléfono inteligente/ dispositivo durante el proceso de instalación 8. Asegúrese de que conecta a través de Bluetooth® con el lanzamiento de la aplicación MonBaby en el dispositivo inteligente, y no intente encontrar el MonBaby mediante la configuración de Bluetooth®.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

PROBLEMA

Sigo perdiendo la señal y/o estoy recibiendo alertas de proximidad.

POSIBLES CAUSAS

1. Batería baja o muerta en el dispositivo MonBaby.
2. La batería no hace una conexión apropiada con el clip de la batería de MonBaby.
3. Interferencia de otros dispositivos inalámbricos o factores ambientales.
4. MonBaby puede ser cubierto por capas suplementarias de tela u otro material.

PASOS RECOMENDADOS

1. Instale una batería nueva (CR2032) siguiendo las instrucciones de sustitución de la batería.
2. Por favor vea el video instructivo en nuestro canal de YouTube de cómo garantizar que la batería está haciendo una conexión adecuada con el clip de la batería de MonBaby <https://www.youtube.com/user/mondevices>
3. Intente apagar otros dispositivos inalámbricos que pueden no ser necesarios y que pueden estar causando interferencia.
4. Asegúrese de que el MonBaby se coloca en conformidad con las instrucciones de este manual y que no está cubierto por capas adicionales de material.

PROBLEMA

Estoy recibiendo alertas falsas en mi aplicación MonBaby.

POSIBLES CAUSAS

1. MonBaby puede estar fuera de rango de su dispositivo inteligente. En caso de alertas de movimiento de la respiración, el MonBaby puede no estar colocado correctamente en el niño.
2. En caso de alertas de vuelco, el MonBaby puede no estar correctamente calibrado.
3. La aplicación de MonBaby puede no tener suficiente memoria para funcionar en su dispositivo inteligente.

PASOS RECOMENDADOS

1. Vuelva a calibrar el MonBaby siguiendo las instrucciones.
2. Forzar el cierre de todas las aplicaciones que usted no está usando mientras se ejecuta la Aplicación MonBaby haciendo doble clic en el botón de inicio en el dispositivo Apple y deslizando el dedo hacia arriba o accediendo al menú de ajustes en su dispositivo Android™, elija Aplicaciones y, a continuación, elija la aplicación que desea cerrar.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	PASOS RECOMENDADOS
Estoy recibiendo demasiadas alertas.	La parte de ajustes de la aplicación de MonBaby puede tener demasiadas alarmas encendidas.	Puede personalizar las alarmas que quiere recibir. Vaya al menú de ajustes y elija sólo aquellas alarmas que son importantes para usted.
PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	PASOS RECOMENDADOS
El anillo de plástico se rompió durante el uso.	MonBaby puede haber sido colocado en ropa demasiado gruesa o la pieza se puede haber roto debido a la fuerza excesiva.	Por favor contáctenos a support@mondevices.com y estaremos encantados de ayudarle.
PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	PASOS RECOMENDADOS
Por equivocación, he puesto mi MonBaby en la lavadora y ahora no funciona.	Daños por agua.	Por favor contáctenos a support@mondevices.com y estaremos encantados de ayudarle.
PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	PASOS RECOMENDADOS
La aplicación MonBaby está drenando la batería de mi dispositivo inteligente.	La aplicación de MonBaby puede correr junto con otras aplicaciones.	La aplicación MonBaby utiliza la cantidad necesaria de recursos para ejecutarse y controlar adecuadamente la actividad de su bebé. Asegúrese de salir de otras aplicaciones que no requieren estar abiertas cuando la Aplicación de MonBaby está en uso. Asegúrese de mantener su teléfono conectado a menudo caso esté utilizando el MonBaby durante la noche.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	PASOS RECOMENDADOS
¿Por qué hay un parpadeo rojo en mi dispositivo?	La batería del dispositivo MonBaby está baja y necesita ser reemplazada.	Instale una batería nueva (CR2032) siguiendo las instrucciones de sustitución de batería.
PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	PASOS RECOMENDADOS
No puedo encontrar mi dispositivo MonBaby.		Accediendo al menú de configuración de la aplicación MonBaby, puede encender la luz LED que hará que la luz del dispositivo gire y se quede de color rojo hasta que desactive este parámetro manualmente.
PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	PASOS RECOMENDADOS
Mi MonBaby no funciona correctamente en un coche, columpio, avión y otros entornos donde hay movimiento continuo.	MonBaby está siendo utilizado cuando el niño está en movimiento.	El dispositivo fue diseñado para trabajar cuando el bebé está durmiendo en su cama a fin de monitorear los movimientos sutiles de abdomen y pecho del niño. Tener al bebé en un coche, avión, columpio o en otros entornos con movimiento hará que el dispositivo reconozca ese movimiento en lugar del movimiento de la respiración del niño.
PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	PASOS RECOMENDADOS
He seguido los pasos y todavía no puedo hacer que el MonBaby trabaje.	Puede haber varias causas que disminuyan el rendimiento óptimo de su dispositivo.	Por favor contáctenos a support@mondevices.com y estaremos encantados de ayudarlo.

monbaby®

A woman with long dark hair, wearing a light-colored lace top, is leaning over a white wooden crib. She is smiling and looking down at a baby lying on its back in the crib. The baby is wearing a light-colored long-sleeved shirt and pants, and is looking up at the woman. The crib has a white wooden frame with vertical slats. The background is a dark blue wall with white abstract shapes.

safesleep

safesleep.monbaby.com